

Kit di Verifica per Fentanil

SW-0690



Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuorjuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Rimuovere il tappo dello SWIPPEŘTM dall'unità di

> Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale evitare che la fiala cada dalla provetta

Campionare la sostanza sospetta con il tappo SWIPPERTM. dello

Prova posti



Rimettere il tappo dello SWIPPERTM nella provetta. Premere con decisione.



Non continuare Ť meno che il tappo SWIPPERTM non O adeguatamente fissato.

Attenzione:

kit contiene un acido. Assicurarsi di seguire tutte le procedure di sicurezza.

Identificazione

isultati

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.



Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.



La comparsa di un colore rosso porpora (vinaccia) indica la presenza di Fentanil.

La comparsa di un colore viola entro un minuto indica la presenza di un oppiaceo quale Eroina, Morfina o Codeina.

Ĉiò non esclude la possibilità che sia presente Fentanyl.

La comparsa di un colore rossiccio-arancio entro un minuto indica la presenza di Anfetamina o Metanfetamina.

* Ciò non esclude la possibilità che sia presente Fentanyl.



Se <u>non</u> si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le sostanze sopra menzionate non sono presenti nel campione testato.

Diluire il reagente con dell'acqua di rubinetto, prima di gettare il kit nei rifiuti.



Smaltimento



EXP: 09/2028

LOT: SW06913125A

www.identa-corp.com Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele