

## Kit di Verifica per Cannabinoidi Sintetici

SW-3400



Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nesuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Test 1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER<sup>TM</sup> dall'unità di test.

> Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2 Campionare la sostanza sospetta con il tappo dello SWIPPER™.



Preparazione

Rimettere il tappo dello SWIPPER<sup>TM</sup> nella provetta. Premere con decisione.



S Non continuare a meno che il tappo SWIPPER<sup>TM</sup> non sia P adeguatamente fissato.

**∧** Attenzione: **∧** 

Il kit contiene un acido. Assicurarsi di seguire tutte le procedure di sicurezza.

Identificazione

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.



Nøn piegare Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.



isultati (

La comparsa di un colore giallo indica la presenza di un **Cannabinoide Sintetico** (nomi di strada - **K2**, **Spice**), come:

Naftoilindoli: JWH - 007, 011, 015, 016, 018, 019, 020, 022, 072, 073, 081, 098, 122, 133, 180, 182, 200, 210, 213, 398, 424.

Benzoilindoli: AM - 223, 694, RCS - 4.

Natoilpirroli: JWH - 030, 031, 145, 147, 307, 309, 368, 369, 370.

<u>^!</u>

Se <u>non</u> si sviluppa alcun colore giallo, le suddette sostanze <u>non</u> sono presenti.

\* Il test **non** reagirà alle seguenti sostanze: Cannabinoidi classici, cannabinoidi non classici, fenilacetilindoli.

Ⅲ Smaltimento Diluire il reagente con dell'acqua di rubinetto, prima di gettare il kit nei rifiuti.



nr of-

IDenta Soluzioni di rilevazione

Prodotto da IDenta Ltd www.identa-corp.com Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele LOT: SW3413125A

EXP: 09/2028