



KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

**Kit di Verifica
con Reagente
Mandelin**

SW-0830



**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del Test

1

Rimuovere il Tappo SWIPPER™ dall'unità di test.



Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2

Campionare la sostanza o pastiglia sospetta.

Toccare oppure Estrarre



Preparazione del Test

3

Rimettere il Tappo SWIPPER™ alla provetta. Premere con decisione.



STOP


Non continuare a meno che il Tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.

Attenzione:
Il kit contiene un acido.
Assicurarsi di seguire tutte le procedure di sicurezza.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando la fiala non si rompe.

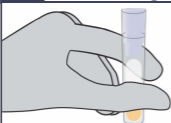

5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.

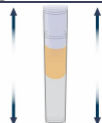

Risultati



La comparsa di un colore verde indica la presenza di **Metanfetamina** o di un oppiaceo quale **Eroina, Morfina o Codeina**.



La comparsa di un colore blu indica la presenza di **Metadone**.



Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le droghe sopra elencate non sono presenti.

Smaltimento

Diluire il reagente con dell'acqua di rubinetto, prima di gettare il kit nei rifiuti.



Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele