

CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI DROGHE

Scheda procedura per IDT5000

IDENTIFICAZIONE DI
ANFETAMINA /
METANFETAMINA

Test per Sostanze



Leggere
prima
dell'uso

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua, accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1	Rimuovere la sonda Smart-Tip™ dall'unità di test.	2		Campionare la sostanza sospetta.		
			Polvere		Comparsa		
			Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione.			Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla pastiglia mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza.	

Preparazione del Test	3	Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.	STOP Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perna flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	Identificazione	4	Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.	5	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.

Risultati		La comparsa di un colore rossiccio-arancio entro un minuto indica la presenza di Anfetamina o Metanfetamina .	
		La comparsa di un colore viola entro un minuto indica la presenza di un oppiaceo quale Eroina , Morfina o Codeina .	
		La comparsa di un colore dal viola scuro al nero indica la presenza di Ecstasy/ MDMA o suoi analoghi.	
		Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le droghe sopra elencate non sono presenti.	
		Procedere alla Diluizione (passaggi 6-9), indipendentemente dal fatto che sia apparso o meno un colore.	

Diluizione	6	Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.	7	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
				Aspettare 5 minuti. La finestra del test si scalderà. E 'normale.

Diluizione	8	Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe.	9	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
				La finestra del test si scalderà. E 'normale.

Smaltimento Dopo la Diluizione, il kit può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 07_01/18

IDenta
Leader mondiale nei prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele