

CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI DROGHE

Scheda di procedura per IDT0150

IDENTIFICAZIONE DI BARBITURICI

Test per Sostanze





**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua, accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1	1 Rimuovere la sonda Smart-Tip dall'unità di test.	2 Campionare la sostanza sospetta.		
			<table border="1"><thead><tr><th>Polvere</th><th>Compresa</th></tr></thead><tbody><tr><td>Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione. </td><td>Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla compressa mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza. </td></tr></tbody></table>	Polvere	Compresa
Polvere	Compresa				
Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione.	Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla compressa mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza.				

Preparazione del Test	3	Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.	STOP Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perna flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	Identificazione	4	Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.	5	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.

Identificazione	6	Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.	7	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.

Risultati	 La comparsa di un colore viola intenso indica la presenza di Barbiturici .
	 Se non si sviluppa alcun colore viola intenso, i Barbiturici non sono presenti.

 **Smaltimento** Il kit di verifica può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 9139

**IDenta**
Leader mondiale nei
prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele