

# CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE  
DI DROGHE


Scheda procedura per IDT4000

## IDENTIFICAZIONE DI ECSTASY /SALI DA BAGNO






### Test per Sostanze

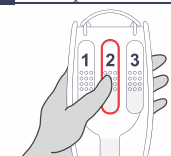

**Leggere  
prima  
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1	1 Rimuovere la sonda Smart-Tip™ dall'unità di test.	2 Campionare la sostanza sospetta.	
			<b>Polvere</b> Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione. 	<b>Compressa</b> Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla pastiglia mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza. 

Preparazione del Test	3	Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.	<b>STOP</b> Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perni flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	Identificazione	4	5
					<b>Perni Flessibili</b>	Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.

Risultati		La comparsa di un colore viola porpora indica fortemente la presenza di Ecstasy /MDMA o suoi analoghi. * Il colore può impiegare fino a 3 minuti per svilupparsi.	
		La comparsa di un colore giallo indica la presenza di Sali da Bagno quali MDPV, Metilone o Butilone	
		Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le sostanze sopra elencate non sono presenti.	
		Procedere alla Diluizione (passaggi 6-9), indipendentemente dal fatto che sia apparso o meno un colore.	

Diluizione	6	7
	Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe. 	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi. 

Diluizione	8	9
	Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe. 	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi. 

**Smaltimento** Dopo la Diluizione, il kit può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 

**IDenta**  
Leader mondiale nei prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd  
www.identa-corp.com  
Tecnologia brevettata  
Prodotto in Israele