

SWIPPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

Kit di Verifica per GHB

SW-8000T




**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione
del Test

1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.

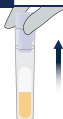

Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2

Campionare la sostanza o inserire il tappo dello SWIPPER™ nel liquido.

Toccare o Immergere



Preparazione
del Test

3

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.




STOP

Non continuare a meno che il tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.

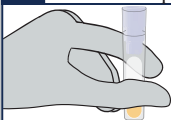

5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.

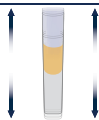

Risultati



Polvere

La comparsa di un colore blu scuro indica la presenza di **GHB** (Acido γ -Idrossibutirrico).



Liquido

La comparsa di un colore blu-verde sulla carta indica la presenza di **GHB**.

Note per il test dei liquidi:

- * Il test è più affidabile per acqua, tè, caffè nero, birra, vodka.
- * Il limite di rilevamento è di circa 2,5 mg/ml di GHB.
- * L'acqua da sola senza GHB produrrà un colore verde.
- * Il kit non è affidabile per l'uso con latte o qualsiasi bevanda con latte, perché appare il colore blu.
- * Il kit non è affidabile per l'uso con bevande agli agrumi.
- * Il limite di rilevamento minimo per il vino bianco e rosso è di circa 15 mg/ml.



Se **non** si sviluppa alcun colore blu o si sviluppa un altro colore, come verde, arancione o rosso, GHB **non** è presente.



Smaltimento

Il kit può essere smaltito in sicurezza nei rifiuti.

ITL
v4
01-24

IDenta
Soluzioni di rilevazione

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com

Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele

LOT: SW8013125AT

EXP: 09/2028