



KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

Scheda procedura per IDT3400

IDENTIFICAZIONE DI CANNABINOIDI SINTETICI

Test per Sostanze



Leggere prima dell'uso

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1	<p>2</p> <p>Rimuovere la sonda Smart-Tip dall'unità di test.</p>	Campionare la sostanza sospetta.	
			<p>Materia vegetale</p> <p>Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione. Assicurarsi che la punta sia completamente coperta.</p>	<p>Polvere Bianca</p> <p>Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione.</p>

Preparazione del Test	3	<p>Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.</p>	<p>STOP</p> <p>Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perna flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.</p>	Identificazione	4	<p>Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.</p>	5	<p>Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.</p>
		<p>Perna Flessibili</p>						

Risultati

La comparsa di un colore giallo indica la presenza di un **Cannabinoide Sintetico** (nomi di strada - **K2, Spice**), come:

Naftoilindoli: JWH - 007, 011, 015, 016, **018**, 019, 020, **022**, 072, **073**, **081**, 098, **122**, **133**, 180, 182, 200, **210**, 213, 398, 424.

Benzoilindoli: AM - 223, **694**, RCS - 4.

Natoilpirroli: JWH - 030, 031, 145, 147, 307, 309, 368, 369, 370.



Se non si sviluppa alcun colore giallo, le suddette sostanze non sono presenti.

* Il test non reagirà alle seguenti sostanze:

Cannabinoidi classici: THC, altri componenti della cannabis e loro analoghi sintetici strutturalmente correlati, ad es. HU-210, AM-906, AM-411, O-1184.

Cannabinoidi non classici: cicloesilfenoli o 3-arilcicloesanolli come CP-47, 497-C8, CP-55,940, CP-55,244.

Fenilacetilindoli: come JWH - 203, 250.



Procedere alla Diluizione (passaggi 6-9), indipendentemente dal fatto che sia apparso o meno un colore.



Diluizione	6	<p>Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.</p>	7	<p>Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.</p>	<p>Aspettare 5 minuti.</p> <p>La finestra del test si scalderà. E' normale.</p>

Diluizione	8	<p>Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe.</p>	9	<p>Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.</p>	<p>La finestra del test si scalderà. E' normale.</p>



Smaltimento

Dopo la Diluizione, il kit può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura.



Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele