

R LA RILEVAZIONE DI DROGHE

### Scheda procedura per IDT0350 **IDENTIFICAZIONE DI**

### **FLUNITRAZEPAM** /BENZODIAZEPINE

Test per Sostanze



Leggere prima dell'uso Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua. accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

# Rimuovere la Preparazione del Test sonda Smart-Tip dall'unità di test.

## Campionare la sostanza sospetta.

#### Polvere

#### Compressa

Toccare con la sonda

Smart-TipTM il campione.

Premere con decisione la sonda Smart-Tip<sup>TM</sup> sulla pastiglia mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza.



Preparazione del Test

Bloccare la sonda Smart-Tip TM nell'unità di test. Premere con decisione



STOP Non continuare a meno che la sonda non sia bloccata sotto i Perni flessibili e non possa non possa essere rimossa dall'unità

dentificazione

Con il pollice e l'indice, premere la camera finché la capsula non si rompe.



Agitare delicatamente l'unità di test per 20 secondi.





La comparsa di un colore rosso porpora (vino) indica la presenza di Flunitrazepam.



La comparsa di un colore giallo indica la possibile presenza di Nitrazepam, Clonazepam o Nimetazepam.



La comparsa di un colore verde indica la possibile presenza di Lorazepam o Temazepam.



Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le sostanze sopra elencate non sono presenti.

Smaltimento

Il kit di verifica può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura,



Prodotto da IDenta Ltd www.identa-corp.com Tecnologia brevettata Prodotto in Israele