



**Leggere prima dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua, accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrati al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.



Preparazione del Test	1	<p>1 Rimuovere la sonda Smart-Tip dall'unità di test.</p> 	2		Campionare la sostanza sospetta.	
			<p>Materia vegetale</p> <p>Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione. Assicurarsi che la punta sia completamente coperta.</p> 	<p>Hashish</p> <p>Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla sostanza mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza.</p> 		

Preparazione del Test	3	<p>Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.</p> 	<p><b>STOP</b></p> <p>Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perna flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.</p>	Identificazione	4	<p>Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.</p> 	5	<p>Agitare delicatamente l'unità di test per 1 minuto.</p> 
	<p>Perna Flessibili</p>							

Identificazione	6	<p>Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.</p> 	7	<p>Agitare delicatamente l'unità di test per 10 secondi.</p> 	<p>Attendere fino a 3 minuti affinché il colore si sviluppi completamente. Il colore potrebbe svilupparsi prima.</p>
-----------------	---	---	---	--	--

Risultati	 <p>Se si sviluppa un colore blu-viola o viola, si sospetta la presenza di Marijuana. Procedere al Passaggio 8.</p>
	 <p>Se non si sviluppa alcun colore blu-viola o viola, non sono presenti né Marijuana né Hashish. Procedere allo Smaltimento.</p>

Conferma	8	<p>Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe.</p> 	9	<p>Agitare vigorosamente l'unità di test per 20 secondi.</p> 	<p>Tenere ferma l'unità di test e mantenerla in posizione verticale, fino a quando 2 strati sono visibilmente separati. Questo potrebbe richiedere fino a 2 minuti. Il processo potrebbe verificarsi prima.</p>
----------	---	---	---	--	---

Risultati di Conferma	 <p>La comparsa di un colore nello strato inferiore di liquido indica fortemente la presenza di Marijuana o Hashish.</p> <p>* Il colore può scurirsi con il tempo.</p>
	 <p>Se lo strato inferiore di liquido non assume alcun colore, non sono presenti né Marijuana né Hashish.</p>

**Smaltimento** Il kit di verifica può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 01/19