

SWIPPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

Kit di Verifica per Ketamina

SW-7000




**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del Test

1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.

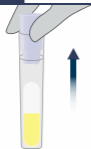

Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2

Campionare la sostanza sospetta con il tappo dello SWIPPER™.


Toccare oppure Estrarre



Preparazione del Test

3

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.

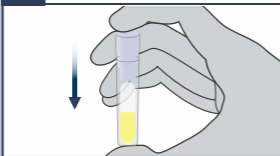


STOP

Non continuare a meno che il tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.

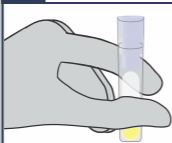

5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.

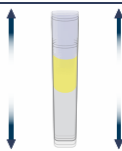

Risultati



La comparsa di di un colore rosso-porpora al viola indica la presenza di **Ketamina**.



Se **non** si sviluppa alcun colore rosso-porpora al viola, la Ketamina **non** è presente.

Smaltimento

Il kit può essere smaltito in sicurezza nei rifiuti.

IDenta
Leader mondiale nei
prodotti forensi