

CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI DROGHE

Scheda procedura per IDT0690

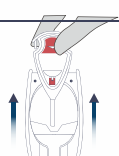

IDENTIFICAZIONE DI FENTANIL

Test per Sostanze









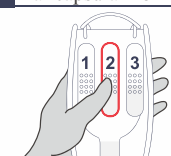
**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1 Rimuovere la sonda Smart-Tip™ dall'unità di test. 	2 Campionare la sostanza sospetta. Polvere Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione in più punti. Assicurarsi che la punta sia completamente coperta. 
-----------------------	---	---

Preparazione del Test	3 Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.  Perni Flessibili	STOP Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perni flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	Identificazione	4 Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe. 	5 Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi. 
-----------------------	--	--	-----------------	---	---

Risultati	 La comparsa di un colore rosso porpora (vino) indica la presenza di Fentanil .	 La comparsa di un colore viola <u>entro un minuto</u> indica la presenza di un oppiaceo quale Eroina, Morfina o Codeina .	 La comparsa di un colore rossiccio-arancio <u>entro un minuto</u> indica la presenza di Anfetamina o Metanfetamina .
	 Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le droghe sopra elencate non sono presenti.		
	 Procedere alla Diluizione (passaggi 6-9), indipendentemente dal fatto che sia apparso o meno un colore. 		

Diluizione	6 Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe. 	7 Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.  Aspettare 5 minuti. La finestra del test si scalderà. E' normale.
------------	--	---

Diluizione	8 Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe. 	9 Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.  La finestra del test si scalderà. E' normale.
------------	--	---

 **Smaltimento** Dopo la Diluizione, il kit può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 07/18